


# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testung zur Selbstanwendung

## Kurzanleitung für Geübte

- Verfallsdatum** auf Verpackungsbeutel noch in Ordnung?
- Teststreifen (Testkassette) aus Verpackung nehmen. **Zeigt Trocknungsmittel gelb an?** Test ist in Ordnung!


- Abstrichtupfer aus Verpackung nehmen und Abstrich** vornehmen:

- ca. 2 cm tief in Nasenloch
- 4- bis 5- mal an der Nasenwand kreisen
- = ca. 15 Sekunden in jedem Nasenloch

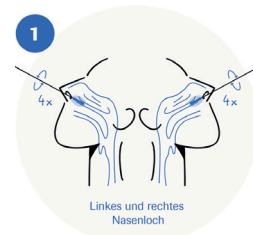


- Extraktion:** Abstrichtupfer im Extraktionsröhrchen extrahieren:

- 10-mal um seine eigene Achse hin und her, dabei unteren Teil zusammendrücken
- ziehen Sie im zusammengedrückten Zustand den Abstrichtupfer aus dem Röhrchen

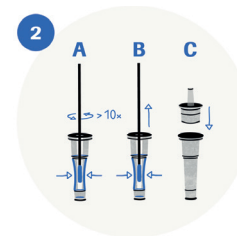

- Spenderkappe fest auf das Röhrchen setzen und **Test durchführen:**

- Teststreifen (Testkassette) auf ebene Fläche legen
- 4 Tropfen aus Röhrchen mit Spenderkappe auf markierte Fläche des Teststreifens geben und
- Uhrzeit notieren  
\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ (hh:mm) oder Stoppuhr 15 min - 30 min

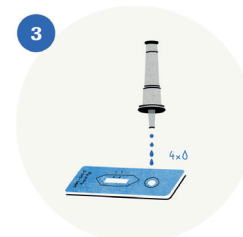


**Hinweis 1:** Der Teststreifen muss weiter waagrecht liegen bleiben.

**Hinweis 2:** Die Zeit muss eingehalten werden.

- Lesen Sie das Testergebnis nach 15 - 30min ab.

- Interpretation**

Ein **positives Testergebnis** bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Bitte nutzen Sie eine FFP2-Maske und gehen Sie zeitnah zu einem aussagekräftigen PCR-Test.

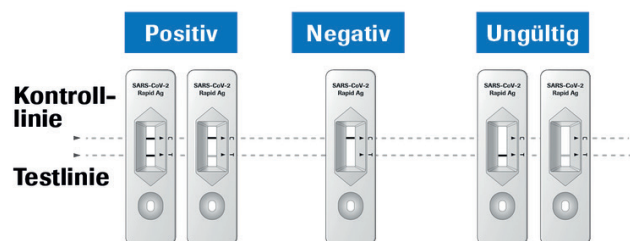

- Entsorgen Sie das Material in den bereitgestellten Abfallbeuteln.

### Grafiken

Roche Deutschland Holding GmbH

URL: <https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/>